

# Détergent désinfectant STERICID B-3DM



Détergent désinfectant pour surfaces, petit matériel  
et dispositifs médicaux non-invasifs.

Dispositif médical classe IIa



Pour le nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non-immérgeables et non-invasifs (capteurs de pression, connectiques et câbles, testeur de glycémie, sondes échographiques, ...) et l'essuyage préliminaire des gaines d'endoscopes avant immersion pour désinfection. Peut être utilisé pour l'entretien des incubateurs hors présence de l'enfant.



## Formule

Actifs: Ethanol (< 3%), Propan-2-ol (< 1%),  
Dimethylbenzylammonium chloride

Tolérance cutanée testée sous contrôle  
dermatologique.



## Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté (sauf \*)

- Bactéricide EN1276\*, EN13727, EN13697\*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348\* et EN14563\* en 15mn.
- Fongicide EN14562\* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min.
- Levuricide EN1650, EN13697\*, EN13624\*, EN14562\* sur Candida albicans en 5 min.
- Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus\* en 1 mn, Rotavirus\* en 15 mn.



## Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Permet de recharger le spray 750ml S-3DM. Pulvériser ensuite sur la surface à désinfecter à une distance d'environ 30 cm. Bien répartir le produit.

Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses. Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée.



## Précautions d'emploi

Aucun pictogramme de danger.

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Stocker dans des conditions normales de température.



## Conditionnement

REF : B-3DM

Bidon 5 Litres.

Carton de 1 bidon.

Palette de 156 cartons