

VIRO'WIPES

LINGETTES DETERGENTES DESINFECTANTES POUR DISPOSITIFS MEDICAUX.

Dispositif médical classe IIb.
Assure une désinfection de haut niveau.



DESTINATIONS

Nettoyage et désinfection par essuyage humide des dispositifs médicaux réutilisables, non immergeables et immergeables sans canal (matériel d'échographie, d'endoscopie, de microscopie, d'ophtalmologie ainsi que toute autre DM non immergeable).

Compatibles avec les sondes externes et endocavitaires.

FORMULE

Actifs : Tensio-actif amphotère, alkylamine en solution hydro-alcoolique.

Sans ammonium quaternaire.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi à usage unique.

Nettoyer soigneusement par essuyage mécanique la surface du matériel à traiter.

Ne pas rincer (sauf pour les surfaces en contact prolongé avec la peau et les muqueuses).

Jeter le support. Refermer le couvercle après chaque utilisation. Renouveler l'opération si nécessaire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter le rejet dans l'environnement.

Produit inflammable et irritant pour les yeux.

En cas d'incident, contact le CAP le plus proche (01.45.42.59.59). Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.



Produit destiné aux professionnels.

CONDITIONNEMENT

REF : 23120L

Boîte de 150 lingettes 130 x 200mm.

Carton de 12 boîtes.

Palette de 90 cartons.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Durée d'utilisation après ouverture : 3 mois.

Consignes de tri : Emballage complet à mettre dans la poubelle de tri (boîte, capot, étiquette).

EAN13 : 3468080783751.

DM Classe IIb.

Produit fabriqué en France.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES A 20 °C

| Activité | Normes | Temps de contact | |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|
| | | Conditions de propreté | Conditions de saleté |
| BACTÉRICIDE | EN16615 | 30 sec | 2 min |
| | EN14561 | 5 min | 5 min |
| | EN17387 | - | 5 min |
| | EN13727 | 2 min | 5 min |
| | EN13727 <i>Enterococcus faecium</i> VRE | - | 5 min |
| LEVURICIDE | EN16615 | 30 sec | 2 min |
| | EN13624 | 5 min | 10 min |
| | EN13624 <i>Candida auris</i> | - | 5 min |
| FONGICIDE | EN13624 | 5 min | 10 min |
| | EN13697 | - | 10 min |
| | EN14562 | 5 min | 10 min |
| | EN17387 | - | 5 min |
| VIRUCIDIE | EN14476 | 5 min | 10 min |
| | EN16777 | - | 5 min |
| | EN14476 <i>Rotavirus</i> | - | 10 min |
| TUBERCULOCIDE | EN14348/EN14563 | 5 min | 10 min |
| MYCOBACTERICIDE | EN14348 | 5 min | 10 min |
| SPORICIDE | EN17126 | 15 min | - |
| | EN17126 <i>Clostridium difficile</i> | - | 15 min |