

# SPRAY DHP

MOUSSE DETERGENTE DÉSINFECTANTE

POUR SURFACES HAUTES ET DISPOSITIFS MEDICAUX

INVASIFS et NON-INVASIFS.



## DESTINATIONS

Nettoyage et désinfection des

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical.
- Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non-invasifs (générateurs d'hémodialyses, sondes d'échographies, unit dentaires....)

## FORMULE

Composition: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (salt): 0,21% (CAS: 94667-33-1), agents de surfaces non ioniques, agents séquestrants, excipients.

## MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur la surface ou le DM à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface.

Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface.

Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.

## PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES A 20°C

BACTÉRICIDE	EN 1276, EN 16615 EN 13727, EN 13697	2 min 5 min
LEVURICIDE	EN 1650, EN 13624, EN 13697 EN16615	5 min 2 min
FONGICIDE	EN 1650, EN13624, EN 13697	15 min
SPORICIDE	EN 13704 sur Clostridium difficile.	15 min
VIRUCIDIE contre virus enveloppés	EN 14476 sur Vaccina. Actif sur Rotavirus, PRV (virus modèle de l'hépatite B), BVDV (virus modèle de l'hépatite C),	5 min

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Aucun pictogramme de danger.

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Produit destiné aux professionnels.

## CONDITIONNEMENT

REF : DE177

Spray 750ml.

Carton de 12 sprays.

Palette de 50 cartons.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

EAN13 : 3615240000177.

Dispositif médical classe IIb.

Produit fabriqué en France.

