

FB SPRAY

SPRAY DETERGENT DESINFECTANT
POUR SURFACES HAUTES
EN 1 SEULE OPERATION.



DESTINATIONS

Nettoyage et désinfection des

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical et vétérinaire.
- Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...).
- Surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

FORMULE

Composition: Poly(oxy-1,2-ethanediy), a-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (salt): 0,21% (CAS: 94667-33-1), agents de surfaces non ioniques, agents séquestrants, excipients.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface.

Laisser agir entre 5 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer, sauf si indication contraire du fabricant du revêtement de la surface traitée ou pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES A 20°C

BACTÉRICIDE	EN1276* EN13727*, EN13697* EN14561*	2 min 5 min 10 min
LEVURICIDE	EN1650*, EN13624*, EN13697* EN14562*	5 min 10 min
FONGICIDE	EN13697*, EN1650*, EN13624*	15 min
SPORICIDE	EN13704* et EN17126 sur Cloristridium difficile.	15 min
ACTIF SUR VIRUS	EN14476* sur Rotavirus, PRV (virus modèle de l'hépatite B), DBV (virus modèle de l'hépatite C), Vaccina.	5 min

*3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Éviter le rejet dans l'environnement.

Aucun pictogramme de danger.

En cas d'incident, contact le CAP le plus proche (01.45.42.59.59). Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Produit destiné aux professionnels.

CONDITIONNEMENT

REF : 1078640

Spray 750ml.

Carton de 12 sprays.

Palette de 50 cartons.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Consignes de tri : Flacon + pompe à mettre dans la poubelle de tri.

EAN13 : 3701387501933.

Produit biocide TP2 et TP4.

Produit fabriqué en France.