


SERUM

PHYSIOLOGIQUE

Humidifie les muqueuses nasales, entraîne les sécrétions et facilite la respiration.

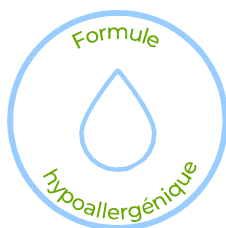

PROPRIETES

Pour le nettoyage des yeux et des fosses nasales de bébé.
Nettoie les paupières, élimine les impuretés de l'œil.

FORMULE

Testée sous contrôle ophtalmologique.
Formulée sous contrôle pharmaceutique.

Composition : Solution de chlorure de sodium à 0,9%.

MODE D'EMPLOI

Détachez une dose, ouvrez en tournant l'embout détachable.
Pour nettoyer les fosses nasales : maintenez la tête de votre bébé légèrement en arrière.
Introduisez l'embout de la dose dans la narine, appuyez doucement et versez quelques gouttes.
Pour la toilette des yeux : versez le sérum sur une compresse stérile, puis essuyez délicatement la paupière de bébé.
Changer de compresse pour l'autre œil.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Usage unique de la dose.
Usage externe.
Non injectable.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser la même dose pour l'hygiène nasale et oculaire.
Ne pas utiliser une dosette endommagée.
Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation indiquée sur la dosette.
Conserver à une température ambiante (entre 15 et 25°C).
En cas de rougeurs persistantes, consulter un médecin.

CONDITIONNEMENT

REF : SERUM

Boîte de 30 unidoses 5ml.
Carton de 15 boîtes..
Palette de 90 cartons.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Durée d'utilisation après ouverture : 6 mois.

Consignes de tri : Emballage complet à mettre dans la poubelle de tri (boîte, unidoses).

EAN13 : 3468080100893.

Dispositif médical.

Produit fabriqué en France.