

SPRAY ASEPTONET

SPRAY DETERGENT DÉSINFECTANT
POUR SURFACES, PETIT MATÉRIEL,
DISPOSITIFS MÉDICAUX.

Dispositif médical classe IIa.



DESTINATIONS

Nettoyage et désinfection:

- des dispositifs médicaux non-invasifs et non-immérgeables (petit matériel en milieu médical et dentaire).
- Surfaces dures non poreuses en milieu médical et dentaire.

FORMULE

Tolérance testée sous contrôle dermatologique.
Parfum : menthol.

Actifs : Ethanol (CAS 64-17-5) (<3%),
Dimethylbenzylammonium chloride (CAS 68424-85-1),
Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (<1%).

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface.

Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface (22g/m² soit 22 pulvérisations).

Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES A 20°C

BACTÉRICIDE	EN1276*, EN13727**, EN13697*, EN14561**	5 min
LEVURICIDE	EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN14562**	5 min
FONGICIDE	EN14562** sur Aspergillus Fugimatus.	5 min
TUBERCULOCIDE	EN14348**, EN14563** sur Mycobacterium Terrae.	15 min
ACTIF SUR VIRUS	EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus**.	1 min
	EN14476** sur Rotavirus.	15 min

*3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton, ** 3g/L albumine bovine

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit destiné aux professionnels.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Aucun pictogramme de danger.
En cas d'incident, contact le CAP le plus proche (01.45.42.59.59). Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

CONDITIONNEMENT

REF : ASEPSPRAY

Spray 750ml.
Carton de 6 sprays.
Palette de 100 cartons.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Langues : français, anglais, espagnol.

Consignes de tri : Flacon + pompe à mettre dans la poubelle de tri.

EAN13 : 3468080705548

Produit fabriqué en France.